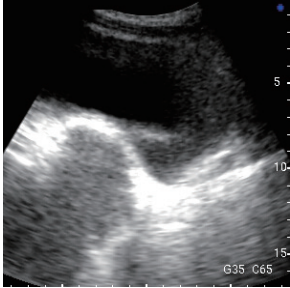
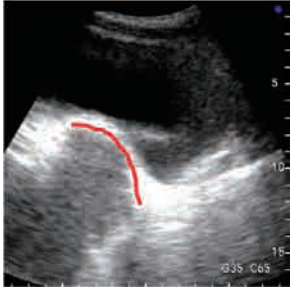
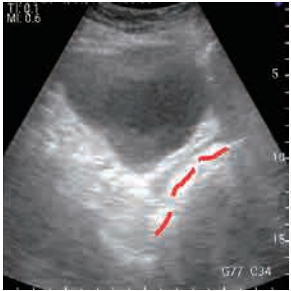
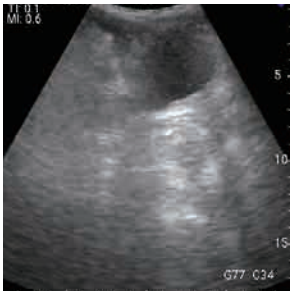
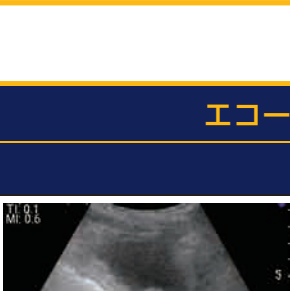
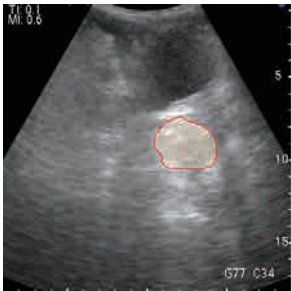




排便ケアアセスメントガイド

Defecation care Assessment Guide : DAG

◆便の硬さ

境界エコーの輝度	エコー画像（長軸）		ブリストル 排便スケール
		直腸にある便の予測	
非常に高い 〜 高い	 	 	BS1 コロコロ便 BS2 硬い便 BS3 やや硬い便 BS4 普通便
不明瞭	 	 	BS5 やや柔らかい便 BS6 泥状便 BS7 水様便

◆便の量

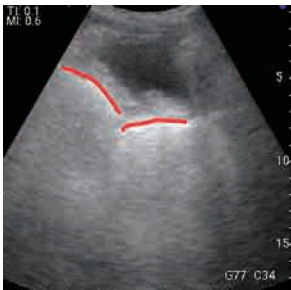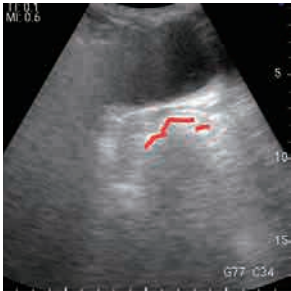境界エコーの長さ	エコー画像（長軸）		便の量
		直腸にある便の予測	
長い (> 5cm)	 	 	手掌大
短い (< 5cm)	 	 	手掌大以下



ポケットエコー miruco




排便ケアアセスメントガイド


Defecation care Assessment Guide : DAG

医療機器承認番号：228ahbx00010000

ブリストル排便スケール

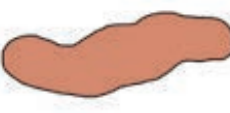1	コロコロ便		硬くてコロコロのウサギ糞状便	遅 ↑ 消化管の通過時間 ↓ 早
2	硬い便		ソーセージ状だが硬い便	
3	やや硬い便		表面にひび割れがあるソーセージ状の便	
4	普通便		柔らかいソーセージ状の便、とぐろを巻く便	
5	やや柔らかい便		柔らかい半分固形状の便	
6	泥状便		ふにゃふにゃの不定形の小片便、泥状の便	
7	水様便		水様で、固形物を含まない液体状の便	

プローブ方向

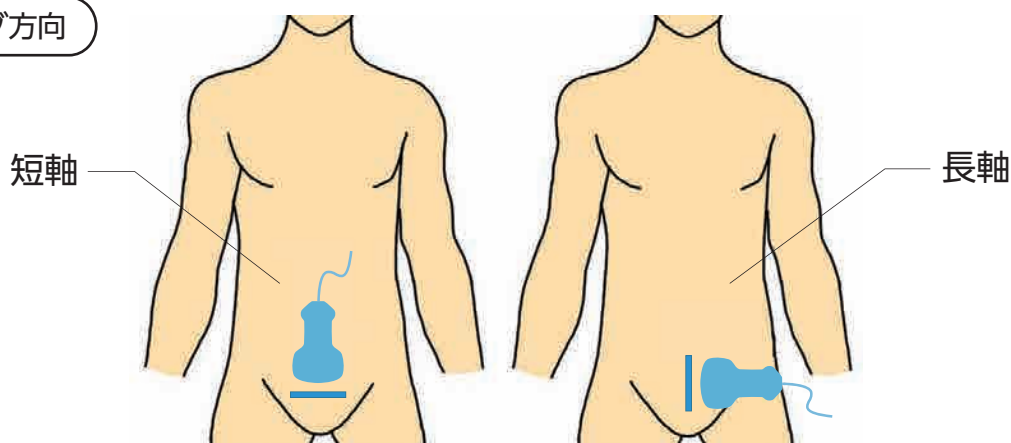

製造販売業者



日本シグマックス株式会社

ポケットエコー miruco お客様窓口 TEL.0800-222-3210 (通話料無料)

本社：〒163-6033 東京都新宿区西新宿 6-8-1 受付時間：9時～17時（平日）※土日、祝日、年末年始を除く ※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。